

Registe o seu medidor para obter ajuda e suporte:
OneTouch.pt/bem-vindo



Guia de Início Rápido

Sistema de automonitorização da glicemia
OneTouch Select Plus Flex®

Utilize este guia para conhecer o seu medidor e siga os passos aqui indicados para começar.



IMPORTANTE: Leia o Manual do Utilizador fornecido com o sistema.



AW 06989705A

ONETOUCH®

1

Definir a hora e a data no seu medidor

Ligar


Prima sem soltar **OK** até surgir o ecrã de inicialização.

Utilize os botões **↓** e **↑** para editar cada definição e prima **OK** para confirmar.




Defina a hora no primeiro ecrã SET

- > A **hora** pisca. Prima **OK** se o valor estiver correto ou edite e confirme.
- > Os **minutos** piscam. Prima **OK** se o valor estiver correto ou edite e confirme.

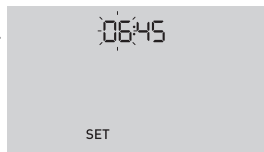

Defina a data no ecrã SET seguinte

- > O **ano** pisca. Prima **OK** se o valor estiver correto ou edite e confirme.
- > O **mês** pisca. Prima **OK** se o valor estiver correto ou edite e confirme.
- > O **dia** pisca. Prima **OK** se o valor estiver correto ou edite e confirme.

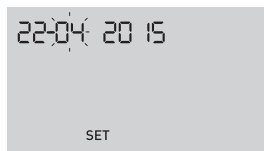

Pronto para realizar um teste

A configuração do seu medidor está concluída quando é apresentado o ecrã com 3 traços.



2

Realizar um teste

Barras de contacto




Porta para tiras de teste

Introduza uma tira na porta para tiras de teste com as barras de contacto viradas para si.




Surge uma gota de sangue intermitente.

Canal estreito

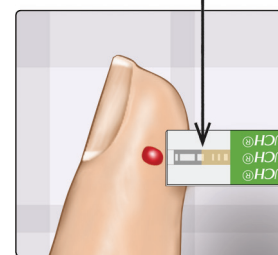

Alinhe a tira de teste com a gota de sangue de modo que o canal estreito na extremidade da tira de teste toque ligeiramente na gota de sangue.

Janela de confirmação preenchida

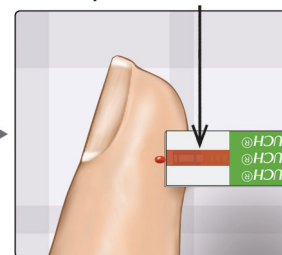

A gota de sangue é puxada para o interior do canal estreito e a janela de confirmação deverá ficar completamente preenchida.

3

Visualizar o seu resultado



Exemplo de uma leitura No intervalo

A sua leitura surge no ecrã. A seta do Indicador de intervalo aponta para a barra de cores do Indicador de intervalo azul, verde ou vermelha para informar se o seu resultado está abaixo, dentro ou acima do limite do seu intervalo.



Exemplo de uma leitura Abaixo do intervalo



Exemplo de uma leitura Acima do intervalo


4

Opcional: Ligar a um dispositivo móvel


O seu medidor é fornecido com tecnologia **Bluetooth®**. Esta tecnologia permite-lhe enviar os seus resultados, sem fios, para um dispositivo móvel, como um telemóvel ou tablet, onde pode visualizá-los e obter o respetivo gráfico. Para obter mais informações sobre a utilização da funcionalidade sem fios do medidor e visualizar uma lista completa de dispositivos e aplicações de software compatíveis, visite-nos em www.OneTouch.pt.

Ligar o medidor

Prima **OK** e **▲** ao mesmo tempo para ligar e desligar a funcionalidade **Bluetooth®**. Quando solicitado pelo seu dispositivo móvel, introduza no seu dispositivo o PIN que aparece no medidor.

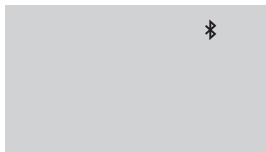

O símbolo significa que o **Bluetooth®** está ligado.

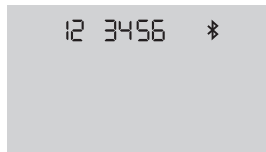


Exemplo de um número PIN.

Símbolos do medidor


	Alimentação do medidor		Funcionalidade Bluetooth® ligada
	Pilha fraca		Modo de histórico (leituras anteriores)
	Pilha gasta		Aplicar amostra
	Solução de controlo		Seta do Indicador de intervalo
	Sincronizar		Modo de definição

Acerca do Indicador de intervalo

O seu medidor é fornecido com um Indicador de intervalo que informa automaticamente se o seu resultado está abaixo, acima ou dentro dos limites do seu intervalo. Os limites de intervalo alto e baixo utilizados pelo Indicador de intervalo são predefinidos da seguinte forma:

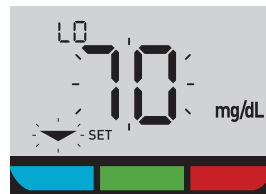

Limite de intervalo baixo predefinido

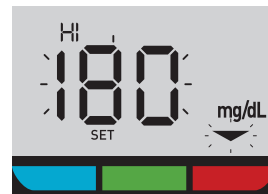

Limite de intervalo alto predefinido

Para obter detalhes sobre como alterar os limites de intervalo predefinidos para se adequar às suas necessidades, consulte o Manual do Utilizador.

A palavra e o logotipo **Bluetooth®** são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas por parte da LifeScan Europe está licenciada. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.



OneTouch®
Data da rev.: 03/2023
© 2018–2023 LifeScan IP Holdings, LLC
AW 06989705A



Contactar o nosso Serviço de Apoio a Clientes OneTouch® (chamada gratuita): 800 201 203.
Horário de funcionamento, dias úteis, das 09:00 às 18:00.

